

DESINFECTANTE EN EL ÁMBITO CLÍNICO

BACTERISAN B-1

Nº DE REGISTRO EN LA AEMPS: 573-DES

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

EMPRESA AUTORIZADA: 0463DS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desinfectante líquido neutro autosecante, con amonios cuaternarios, diseñado como desinfectante de superficies en el ámbito hospitalario. Su formulación incorpora una mezcla de tensoactivos y un amonio cuaternario con un amplio espectro de actividad.

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda una limpieza previa de la superficie a desinfectar. Aplicar el producto puro por pulverización, inmersión o fregado manual de manera que la superficie quede totalmente impregnada. Dejar secar la superficie. Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta y, a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico o detergente.

PARAMETROS DE CONTROL

ASPECTO: Líquido
COLOR: Incoloro
Ph (conc.): $6,0 \pm 0,5$
DENSIDAD (20°C) :-
TIPOS DE ENVASES: 5 L, 1 L.
COMPOSICIÓN:
Cloruro de didecildimetilamonio.....1%
Etanol.....10%
Propan-2-ol.....50%
Excipientes csp.....100%

DOSIFICACION

Puro.

APLICACIONES

Se emplea principalmente para el lavado y desinfección de superficies y utillaje en el ámbito hospitalario.

PRECAUCIONES

Ligeramente irritante para los ojos y la piel. Fácilmente inflamable. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Manténgase fuera del alcance de los niños, alimentos y bebidas. Evítese el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles o enfermas de la piel. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y abundantemente con agua. Manténgase el recipiente bien cerrado, alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico, y muéstrela etiqueta o el envase. En caso de ingestión accidental, consultar al Instituto Nacional de Toxicología. Tel:91 562 04 20

SI BIEN LA INFORMACION INDICADA ES A NUESTRO CRITERIO CORRECTA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE USO DEL PRODUCTO QUEDAN FUERA DE NUESTRO CONTROL, DECLINAMOS CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD POR UNA INCORRECTA UTILIZACIÓN DEL MISMO.